

# ミニポッドフレイバー

簡易マニュアル

合同会社ハイケアー灯

# 目次

1. 各部の名称	各部の名称、ミニポッドフレーバーとは	3
2. 利用方法		
2-1. 機器を取り扱う前に	機器を取り扱う前の注意事項	4
2-2. 吸入・喫煙開始	水素吸入・喫煙開始手順の説明	4～5
2-3. 吸入・喫煙終了	水素吸入・喫煙終了手順の説明	6～7
2-4. ご使用後	ご使用後のメンテナンスの説明	7
2-5. CBD+H2吸入	CBD+H2吸入の説明	8～9
3. 使用上の注意事項	全般的な注意事項	10
4. 保証	ギャランティーカードについて	11

# 1. 各部の名称

## 1. 各部の名称

各部の名称は以下の通りです。

### ミニポッドフレーバー



## ミニポッドフレーバーとは

嗜好性と遊び心を持たせた携帯型の水素吸入器です。市販のスティック型電子たばこを取り付けることで、フレーバーと煙を水素吸入に付加することができます。電子たばこを取り付けなければ通常のインヘーラーとしてご利用いただけます。

水素流路と電子タバコ流路を吐出口まで完全に分断し、さらに堅牢な逆流防止機構を内蔵させることで安全性を担保しました。

また、水平方向のノズルを採用することで、漿液性唾液の流入を最小限に抑えており、10分間程度までの吸入・喫煙で、衛生性が保たれるように配慮されております。

当社では電子たばこを一切取り扱っておりませんので、別途お買い求めください。

現時点で下記メーカーのスティックタイプ電子たばこに対応しております。DBLSTICKには対応していません。

- ・ ANUWAA
- ・ eagle energy
- ・ Eonfine
- ・ iSmoke
- ・ coco iine
- ・ skew
- ・ CANNA CREATE



- ・ TOAMIT  
CANNA bitus

Skew及びCANNA CREATEには、専用の**CBDノズル**が必要です。  
電子たばこにつきましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 2. 利用方法

### 2-1. 機器を取り扱う前に

- 1) 機器の周囲に火器や熱源が無いことを必ず確認してください。

※暖房機等の温風が直接当たらないことや、電子機器などからの余熱の影響が無いことも確認してください。

- 2) 任意の方法で体の静電気を除去してください。

※効果の立証された静電気除去リストバンド等を事前に身に付けておくことを推奨致します。

- 3) 水素検知器（防爆、防水仕様、1,000ppmスケール推奨）の電源を入れ、水素供給源の直上近傍に設置し、水素の漏洩が無いことを確認、監視してください。



### 2-2. 吸入・喫煙開始

- 1) ミニポッドもしくはハイドロポッド10/15（以降ポッドと呼称します）と、スティックタイプ電子たばこを準備し、ポッドの水素残量が十分であることを確認してください。



- 2) スティックタイプノズルにスティックタイプ電子たばこの吸口側を回しながら奥までねじ込みます。電子たばこの外装には右巻きと左巻きがあり、巻き方向と同じ方向に回しながら挿入すると外装が剥がれ、挿入し辛くなる場合があります。



## 2. 利用方法

- 3) スティックタイプノズルの穴に、ミニポッドフレーバー本体のピンが入るように位置を調整して押し込むと磁力で接続されます。接続したら接続部に隙間が無いことを確認します。



- 4) ミニポッドフレーバー本体のアダプターにハイドロポッドのアダプターを真っ直ぐ奥まで押し込みロックさせます。水素の吐出がスタートしますので直ぐに吸入・喫煙を開始します。
- ロック後に本機を保持する際は、**下部を中心にごく軽く握ってください。強く握ると損傷する恐れがあります。また右下写真のような保持の仕方は絶対にしないでください。**



**絶対ノズルを咥えて息を吐き出さないでください。**

**吸入・喫煙中は吸気口を塞がないでください。**

**ノズルを出来るだけ浅く咥えて吸入・喫煙してください。**

**吐出口が上向きにならないような姿勢で吸入・喫煙してください。**

## 2. 利用方法

### 2-3. 吸入・喫煙終了

- 1) ポッドを片手で押さえ、もう片方の手でポッドのアダプターをつまんで引き上げてロックを解除し取り外してください。ロックが解除されると同時に水素の吐出が止まります。



水素が出続けますので取外し忘れには十分注意してください。またポッド内の水素を全て吸い切ろうとして、空になるまで吸い続けしないでください。僅かでも水素を残した状態で使用を止め、再充填してください。

- 2) スティックタイプノズルをミニポッドフレーバー本体から真っ直ぐに引き抜き取り外してください。



## 2. 利用方法

3) スティックタイプ電子たばこを真っ直ぐ引き抜いて取り外してください。



\* Eonfineを取り外す際に捻ったり回転させたりするとカートリッジが外れますのでご注意ください。

### 2-4. ご使用後


- 1) ノズルの吐出口周りに付着した唾液をティッシュ等で綺麗に拭き取って乾燥させてください。
- 2) ノズル内部の逆流防止機構が正常に機能しているか確認してください。ノズルの小穴のみを指でしっかり塞いだ状態でノズルを口に含み息を吐き出します。吐き出せなければ正常です。



大穴は塞がずに、  
小穴のみを指で塞いで息を吐き出す

ノズルは、ハイケアステーションでのメンテナンス時に以下の写真のように分解を行います。

ノズルの吐出口付近を乱暴に扱うと、意図せず外れてしまう場合がありますのでご注意ください。外れた場合は、必ずハイケアステーションに修理依頼してください。

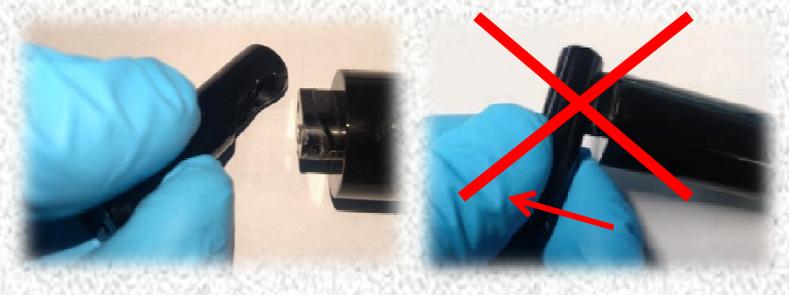

3) ノズルの吐出口の穴内部を次亜塩素酸水を含ませたクリーン綿棒で除菌クリーニングし乾燥させてください。



**ノズルのクリーニングにアルコール類は使用できませんのでご注意ください。**

#### 【推奨綿棒】

- ・ 大穴用（喫煙穴）

[https://www.amazon.co.jp/dp/B07WVRGHCB?ref=ppx\\_yo2ov\\_dt\\_b\\_fed\\_asin\\_title&th=1](https://www.amazon.co.jp/dp/B07WVRGHCB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)

- ・ 小穴用（水素穴）

[https://www.amazon.co.jp/dp/B09VNKBM81?ref=ppx\\_yo2ov\\_dt\\_b\\_fed\\_asin\\_title&th=1](https://www.amazon.co.jp/dp/B09VNKBM81?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)

- \* 吸入中に唾液が深くまで流入しないように設計されているため、小穴は奥深くまでクリーニングする必要はありません。
- \* 綿棒は繰り返し使用しないでください。

## 2. 利用方法

### 2-5. CBD+H2吸入

1) 下写真の物品を準備してください。



2) カートリッジのシールを剥がしてください。



3) ミニポッドフレイバー本体の穴の中心にCBD VAPEを奥まで差し込みます。



4) 注意深く真っ直ぐノズルをCBD VAPEに挿入し、本体のピンがノズルの小穴に入るよう位置を調整し接続します。

	<p><b>カートリッジはガラス製で非常に割れやすいため、慎重にノズルへ挿入してください。少しでも引っ掛かりを感じた場合は、絶対無理やり押し込まないでください。少し抜いて引っ掛かりを解消してから再度真っ直ぐ挿入してください。抜く時も同様です。</b></p>
--	---



## 2. 利用方法

5) ハイドロポッドを取り付け喫煙を開始します。

6) 喫煙が終了したら、逆の手順で分解してください。



### 3. 使用上の注意事項

- 本機は、ミニポッド、ハイドロポッド10、ハイドロポッド15専用の水素吸入器です。上記以外の如何なる機器とも接続しないでください。
- 水素吸入用途以外でのご使用は、事故を誘発する恐れがありますので、絶対に行わないでください。またハイドロポッドの取扱説明書を熟読・理解してから取り扱いを開始してください。
- 本機は18℃～25℃の環境でご使用ください。
- OEM品（特殊流量設定品）にはカラーラベルが貼られておりますので剥がさないでください。
- 本機には高精度フィルターが内蔵されており、大凡1年に1回の交換を推奨しております。
- 本機の**設定流量はあくまで目安**となります。環境温度や水素残量、吸入時間により流量が変化しますが、故障ではありませんのでご周知ください。
- 吸入中は、握り手が軽くハイドロポッドに接触する状態を維持してください。体温が伝わることで流量を維持する仕組みとなっています。
- 使用時間に伴い、流量は80ml/分程度から50ml/分程度まで徐々に低下します。
- 流量が徐々に低下するため、ミニポッドで使用する場合、合計150分程度吸入することができます。
- ノズルを口に含むと、漿液性（しょうえきせい）唾液が分泌されます。吸入が進みリラックス状態になると、副交感神経が優位になり、さらに唾液の分泌が促されるため、1回の吸入は10分程度を目安に終了してください。また、次回使用までは十分な間隔を空け、唾液を乾燥させてからご使用ください。
- 梱包直前に加熱除菌を行っており、サーモシールの赤変がその証左となります。
- ハイドロポッドの取外し忘れにご注意ください。湿度によっては30分程度放置すると、ハイドロポッドのみならず本機も結露する場合があります。結露は雑菌繁殖要因となりますので、速やかにハイドロポッドを取り外し、結露を拭き取った後、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
- 接続した状態で長時間放置したり、ハイドロポッドが空の状態**で吸入・喫煙を続けると、ハイドロポッド内部に空気や水分が流入し、汚染解消処置が必要になりますので、十分ご注意ください。ハイドロポッドの圧力がゼロになったり、滴るような結露が発生した場合は、必ずハイケアステーションに相談してください。
- 必ずハイドロポッドが空になる前に本機の使用を停止し、再充填を行ってください。
- 本機本体のピンは細いため、怪我には十分注意してください。
- 必ずウェブ上の“caution”に目を通してからご使用を開始してください。
- バブリングによる水素の吐出確認は雑菌繁殖要因となりますので絶対に行わないでください。残量の確認は別売りの水素検知器やマノを使用して行ってください。
- 本機は水素ガスを活用する機器となります。水素ガスの危険性を熟知した上でご使用ください。
- 許可なく本機を分解しないでください。所定の機能が発揮されない場合は、速やかに使用を止め、ハイケアステーションに相談してください。
- 本機は医療機器ではありません。医療行為には絶対使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないで下さい。お子様がご使用の際には、保護者の監督のもと行ってください。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 4. 保証

**★ギャランティーカードは再発行しませんので大切に保管してください。**

\*ギャランティーカードは、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってギャランティーカードによってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<保証期間が過ぎているときには>

●修理によって商品の機能が維持できる場合、補修用部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

<保証とアフターサービスについて>

●保証は本製品を購入された方のみ適用されます。保証期間はご購入日から1年間です。

<無料修理規定>

●保証期間内に本取扱説明書ならびにウェブ上の“caution”に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。

●保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②ご購入後の輸送、移動、落下等による故障及び破損。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や取扱不備による故障及び破損。
- ④本書の指示に反する場合。